



Tableau encodage et prélèvements de sérologie automatisée.

Analyse	Code LIS	Type de prélèvement	Condition particulière de prélèvement	Conservation avant analyse	Délai acceptation ajout
Lyme IgG	LYMEG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Lyme IgM	LYMEM	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Lyme IgG LCR	LYMEPL	LCR	-	Microbiologie	
EBV IgG	EBVG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
EBV IgM	EBVM	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
EBNA	EBNA	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Parvovirus B19 IgG	PARVOG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Parvovirus B19 IgM	PARVOM	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Mycoplasme pneum. IgG	MYPNG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Mycoplasme pneum. IgM	MYPNM	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
H.simplex IgG	HSVG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
H.simplex IgM	HSVM	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
H.zoster IgG	VZVG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
H.zoster IgM	VZVM	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Oreillons IgG	OREIG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Oreillons IgM	OREIM	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Rougeole IgG	ROUG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Rougeole IgM	ROUM	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
NSE	NSE ou NSEP	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
B2-microglobuline	B2MIC	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Calcitonine	CALCIT	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
DHEA sulfate	DHEAS	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
ACTH	ACTH	Plasma EDTA	Mettre immédiatement le tube EDTA sur glace, puis centrifugation	Congélateur n°27	Pas d'ajout
Aldostérone	ALDO	Plasma EDTA	Centrifugation dès réception de l'échantillon	Congélateur n°27	Pas d'ajout
Rénine	RENINE	Plasma EDTA	Centrifugation dès réception	Congélateur n°27	Pas d'ajout



<u>Analyse</u>	<u>Code LIS</u>	<u>Type de prélèvement</u>	<u>Condition particulière de prélèvement</u>	<u>Conservation avant analyse</u>	<u>Délai acceptation ajout</u>
Chlam. Trachom IgA	CHLTRA	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Chlam. Trachom IgG	CHLTRG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Toxine Clostr.dif.	CLOST	selles	-	Microbiologie	6 jours
Hélicobacter Pylori	HELISE	selles	-	Frigo microbio 68	3 jours
Total IgE	IGE	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Calprotectine	CALPRO	selles	-	Frigo micobio n°68	Pas d'ajout
IgE Spécifiques(Rast)	Selon type de rasts cfr doc SP-SERO-021	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
IgG Gliadine(Ggp)	GLIAIG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
IgA transglutaminase . (Acy)	ACTTG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
IgG Cardiolipines (Gcl)	CARDG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
B2 glycoprotein (Gb2)	B2GPG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
Ac.Citruline(cp)	PEPCIT	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
MPO(mps)	MPOSER	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
PR3(prs)	PR3	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
dsDNA(dn)	DSDNA	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
ENA(ctd)	ENA	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
ASCA IgG	ASCAG	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
ASCA IgA	ASCAA	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
EliA T : tsr(TSI)	ACTSI	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours
B2-microglobuline urinaire	B2MIU	urine	-	Frigo tri n°81	7 jours



<u>Analyse</u>	<u>Code LIS</u>	<u>Type de prélèvement</u>	<u>Condition particulière de prélèvement</u>	<u>Conservation avant analyse</u>	<u>Délai acceptation ajout</u>
Aldostérone urinaire	ALDOU	Urine	-	Congélateur n°27	Pas d'ajout
Quantiféron	QUANTI	4tubes spécifiques quantiféron	Mise à l'étuve 37°C 16 à 24h puis double centrifugation	Frigo 71 Séro automatique	Pas d'ajout
Ac. Anti-Membrane basale (Gb)	GBM	sérum	-	Frigo tri n°81	10 jours